

## Gruszka do zaparć dla dzieci 1-3 lat (nr 7) Sanity

Cena: 8,27 pln



### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis:

Szybki i prosty sposób na zaparcia

Produkt przeznaczony jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej w warunkach domowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Gruszka dedykowana dzieciom w wieku 1-3 lat.

Polecamy również Gruszkę Sanity do zaparć dla dorosłych oraz Gruszkę do zaparć od 6 do 12 miesięcy.

Gruszka do zaparć dla dzieci 1-3 lat to propozycja dla rodziców, którzy chcą przeprowadzić bezpieczną lewatywę doodbytniczą w warunkach domowych.

Wysokiej klasy Gruszka to szybki i skuteczny sposób na zaparcia, dzięki któremu można pozbyć się toksyn z organizmu dziecka. Nasza Gruszka jest atestowana, nie zawiera ftalanów.

Produkt wspomaga działanie układu pokarmowego: zaparcia, skurcze jelit, przewlekłe bóle brzucha, trudności z wypróżnianiem, zapalenia jelita grubego. Lewatywy stosowane są również w zmniejszaniu dolegliwości układu oddechowego: naloty na języku, nieprzyjemny oddech, zapalenie jamy ustnej, jak również wspomagają układ nerwowy człowieka: przewlekłe bóle głowy, zmęczenie i rozdrażnienie.

#### Inne informacje:

Usuwa toksyny z organizmu

Oczyszcza układ pokarmowy

Przynosi ulgę w zaparciach

Wspomaga w odchudzaniu

Pobudza perystaltykę i mikroflorę jelitową

**Dawkowanie:**

Przed wykonaniem zabiegu zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wymyj każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurz na kilka minut w gotującej się wodzie. Zwróć uwagę na to, aby elementy były zanurzone w całości.

Po ostudzeniu, napełnij gruszkę płynem do przepłukiwania ciała, o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Kankę nasmaruj cienko wazeliną lub olejem jadalnym i wprowadź delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ściśnij gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zaciśnij mocno pośladki, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.

**Przechowywanie:**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Podmiot odpowiedzialny:**

ALBERT-POLSKA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.