

Gruszka do zaparc (nr 9) Sanity



Cena: 13,03 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Gruszka do lewatywy

Produkt przeznaczony jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej w warunkach domowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Gruszka dedykowana osobom dorosłym i dzieciom powyżej 3 roku życia. Dla młodszych dzieci polecamy inne gruszki Sanity: Gruszkę higieniczną 6-12 miesięcy oraz Gruszkę do zaparc od 1 do 3 lat.

Gruszka do zaparc którą mamy Państwu przyjemność zaprezentować przeznaczona jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej u osób dorosłych oraz dzieci od 3 roku życia.

Wysokiej klasy gruszka zawiera anatomiczną dopasowaną końcówkę, oraz dostępna jest w wygodnej pojemności 224 ml. Przyrząd wykonany jest z bezpiecznego, atestowanego tworzywa.

Produkt wspomaga działanie układu pokarmowego: zaparcia, skurcze jelit, przewlekłe bóle brzucha, trudności z wypróżnianiem, zapalenie jelita grubego. Lewatywy stosowane są również w zmniejszaniu dolegliwości układu oddechowego: naloty na języku, nieprzyjemny oddech, zapalenie jamy ustnej, jak również wspomagają układ nerwowy człowieka: przewlekłe bóle głowy, zmęczenie i rozdrażnienie.

Inne informacje:

Usuwa toksyny z organizmu

Oczyszcza układ pokarmowy

Przynosi ulgę w zaparciach

Wspomaga w odchudzaniu

Pobudza perystaltykę i mikroflorę jelitową

Dawkowanie:

Przed wykonaniem zabiegu zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wymyj każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurz na kilka minut w gotującej się wodzie. Zwróć uwagę na to, aby elementy były zanurzone w całości.

Po ostudzeniu, napełnij gruszkę płynem do przepłukiwania ciała,

o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Kankę nasmaruj cienko wazeliną lub olejem jadalnym i wprowadź delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ściśnij gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zaciśnij mocno pośladki, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.

Stosuj zgodnie z przeznaczeniem. Produktu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej. Nie należy stosować środków dezynfekujących. W razie uszkodzenia jednej z części wyrzucić cały zestaw. Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

ALBERT-POLSKA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.